

身体拘束にならない唯一の座位保持具

座位保持具

安全一番



着座者本人による着脱が可能のため、身体拘束になりません。




片手で取外し可能

特 徴

- ① 自立支援用具。車いすからのズレ落ち防止。体位保持、安全性の向上。
- ② 着座者本人による自由な締め付け解除操作を可能にしたため、不本意な身体拘束によるストレスからの開放。
- ③ 下腹部取付の為、運動能力制限無し。
- ④ クッション性のある座布団使用。
- ⑤ 体型に関わらず万能型。
- ⑥ 取り付け・取り外し簡単。洗濯可能。
- ⑦ 食べこぼし等の汚れ防止。撥水加工で清潔維持。


車いすへの取付方法

- ① 座面は前方・後方のパイプ4箇所と後部中央のヒモをXフレームへ結ぶ。

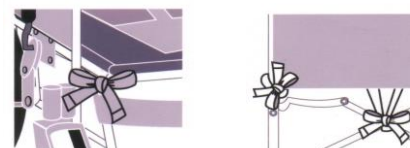


- ② 背もたれに【A】マジックファスナー式ベルトを正面から取付。折り返しが見える様にします。【B】Y字のマジックベルトを貼り付けします。

本人の使用方法

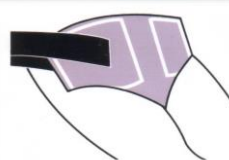

①右側固定

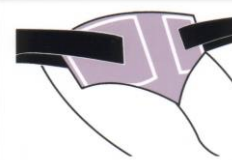

②左側固定


Y字になったマジックベルト【B】方式で、片手で簡単に着脱できます。

YouTube
動画でチェック！



様々なタイプの車いすに適合
(座幅380~420mm)

背張り調整型、
食堂椅子にも対応

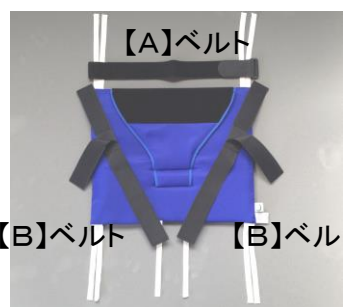

座位保持具《安全一番》

TAIS 01341-000002
【開発製造販売元】

株式会社あかね福祉
TEL024-937-5022

価格 22,000円 (本体20,000円)



4562147680126

安全一番

検索