

水平移乗ボード 楽シート

福祉用具貸与

力まかせ・
抱きかかえ介助
の見直しに

ベッドと リクライニングキャリー間の移乗

ベッドからの離床を促し、寝たきり状態を防ぐために
「負担・苦痛のない介助をめざす」移乗ボード
介護する方の腰痛予防と、介護される方の苦痛を緩和

持ち上げ介助ゼロ

検索

自立

と 尊厳 のために

「楽シート」は従来2人がかりで抱えて行っていた移乗を、持ち上げることなく1人で楽に行える様に開発されました。
介護する方の腰痛予防と、介護される方の苦痛を緩和し、離床を促します。

リクライニングキャリーの背を起こした時に腰部がフィットします。
また、コンパクトに折りたためるので持ち運び、収納が楽になります。

畳めて
コンパクト



足ポケット部を面ファスナー方式で股関節、膝や甲の変形など様々な方に安心して使用していただけます。☒


様々な症状
の方に対応

水平移乗
が楽に

強度な
取手

大柄な方にも対応。
(体重80kgまで)

中板に硬さとしなやかさを備えた素材を使用し、ベッドとリクライニングキャリーの間を安全に乗り越える事ができます。
また、スムーズに移乗できる様に、裏面は横方向に滑りやすい生地を使用しています。

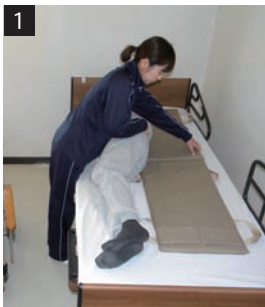

1 頭がしっかり乗るように、体の下に楽シートを敷きます。

2 膝を曲げ、足先をポケットに差し込みます。水平に滑らせる事ができるようにベッドの高さを調節します。

3 両手で2か所、頭・腰部の取手を握り、頭部から先に移乗させます。

4 頭部がしっかりリクライニングキャリーに乗ったら、腰部を引き寄せます。

5 楽シートとリクライニングキャリーの腰部位置を合わせて、背もたれを起こします。体圧分散クッションタイプもあります。

| | | |
|---------|---------------------|--------------------------------|
| 品名 | 水平移乗ボード 楽シートN-160 | 水平移乗ボード 楽シートN-160Kクッションタイプ |
| 型番 | AKR-06N-160 | AKR-06N-160K |
| 標準価格 | 41,800円 (本体38,000円) | 84,700円 (本体77,000円) |
| JANコード | 4562147680287 | 4562147680294 |
| TAISコード | 01341-000007 | 01341-000008 |
| 寸法 | 幅390×長さ1620×厚さ17mm | 幅390×長さ1620×厚さ57mm |
| 材質 | 表面素材 帆布 綿100% | 表面素材 帆布 綿100% |
| | 光沢布 ポリエステル100% | 光沢布 ポリエステル100% |
| | 中板素材 発砲ポリエチレン | 中板素材 発砲ポリエチレン 体圧分散天然ゴムクッション |

介護保険 福祉用具貸与
製造：日本
開発・製造：株式会社あかね福祉

動画で
詳しい商品の説明
をご覧になれます

